

MANUAL DE UTILIZARE

AMPLI Lampă LED cu lupă pentru cosmetică 1005T

AMPLI+ Lampă LED cu lupă pentru cosmetică pe suport cu roți 1005

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului. De asemenea, puteți solicita îndrumarea unui specialist pentru a vă asigura că folosiți echipamentul în mod corect și în siguranță.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru accidente sau deteriorările apărute ca urmare a utilizării incorecte a aparatului.

Compania își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produsului fără notificare prealabilă. Dacă observați erori în acest manual, vă rugăm să ne contactați pentru a le putea corecta.

Instrucțiuni de utilizare



Asamblați baza aparatului conform schemei de montaj.

Introduceți lampa în suportul bazei.

Conectați cablul de alimentare la sursa de curent.

Porniți aparatul apăsând butonul POWER.

Deschideți capacul de protecție din plastic și orientați lupa către zona de tratament.

Ajustați distanța dintre lampă și piele pentru o vizibilitate optimă.

Reglați nivelul de luminozitate în funcție de necesități.

După ajustarea corectă a distanței și luminii, puteți începe analiza pielii sau alte tratamente cosmetice.

Avertismente de siguranță

Pentru a preveni accidentele sau deteriorarea echipamentului, respectați următoarele recomandări:

Nu încercați sub nicio formă să deschideți sau să inspectați componentele interne ale aparatului.

Dacă este necesară o verificare tehnică, contactați furnizorul sau un tehnician autorizat.

Nu utilizați aparatul în medii umede sau slab ventilate, precum: băi, camere umede, spații cu condens. Umiditatea poate deteriora componentele electrice.

Nu utilizați aparatul în exterior. Expunerea la ploaie, praf sau temperaturi extreme poate provoca defectarea echipamentului.

Dacă, cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de către un tehnician calificat sau de către furnizor pentru a evita orice risc.

Întreținere și curățare

Pentru a menține performanța și durata de viață a lămpii:

Dacă pe lentilă sau pe sticla lămpii se acumulează praf, curățați-o folosind hârtie specială pentru curățarea sticlei sau un material foarte moale.

Nu utilizați materiale abrazive sau produse chimice agresive deoarece pot deteriora suprafața lentilei.

Fișă tehnică

Dimensiuni și greutate

Dimensiune ambalaj: 89 × 30 × 13 cm

Greutate brută: 8,3 kg

Greutate netă: 7,5 kg

Caracteristici de lucru

Mărire: 3 dioptrii / 8 dioptrii

Număr LED-uri: 14 LED-uri SMD

Iluminare: 2300 lux / 300 lumeni

Caracteristici electrice

Tensiune nominală: 220 – 240 V

Frecvență: 50 / 60 Hz

Putere nominală: 6 W

Declarație de conformitate CE

Acest produs respectă cerințele următoarelor directive europene:

Directiva pentru echipamente de joasă tensiune – 2014/35/EU

Directiva privind compatibilitatea electromagnetică – 2014/30/EU

Reciclare

Simbolul prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că echipamentul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere.

În Uniunea Europeană, echipamentele electrice și electronice trebuie colectate separat și reciclate conform legislației locale.

Prin reciclarea corectă a acestui produs contribuiți la:

protejarea mediului

conservarea resurselor naturale

reducerea deșeurilor electrice.

Pentru informații suplimentare despre reciclare, contactați autoritățile locale sau furnizorul produsului.

Producator:

WEELKO BARCELONA SL Cami de Garreta 92 Berga Barcelona Spania info@weelko.com
+(34) 938-249-020

Distribuitor:

PODOLOGISTIC SRL BRASOV ROMANIA podologic@gmail.com 0727055202