

MANUAL DE UTILIZARE

Cărucior cosmetic cu sertar UV – SPIN

Model: WKT001

Producător: Weelko

Importator: Weelko Barcelona S.L

Distribuitor : Podologic SRL Brasov

e-mail: podologic@gmail.com tel: 0727055202 www.podologic.ro

1. Introducere

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. Manualul conține informații importante despre utilizarea corectă și întreținerea echipamentului.

Pentru siguranță și performanță optimă, se recomandă ca utilizarea echipamentului să fie realizată de personal instruit.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru accidente sau daune cauzate de utilizarea incorectă a produsului.

Compania își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produsului fără notificare prealabilă.

2. Conținutul pachetului

La primirea coletului verificați dacă pachetul conține:

Căruciorul cosmetic SPIN

Sertarele și componentele acestuia

Tavă detașabilă

Sistem de sterilizare UV

Dacă lipsesc componente, contactați distribuitorul.

3. Instrucțiuni de utilizare

Conectați cablul de alimentare la o priză electrică.

Așezați unul sau două dispozitive pe tava extensibilă anti-coliziune.

Depozitați instrumentele și accesoriile în cele două sertare standard.

Pentru dezinfectarea instrumentelor utilizați sertarul superior cu lumină UV.

Sertarul UV este prevăzut cu oglindă interioară, care permite o dezinfecție la 360°.

Pentru o sterilizare corectă, instrumentele trebuie să rămână în sertar aproximativ 15 minute.



4. Precauții și avertismente

Pentru utilizarea în siguranță a produsului, respectați următoarele recomandări:

Nu deschideți și nu inspectați componentele interne ale aparatului. În cazul unei defecțiuni contactați distribuitorul sau un tehnician autorizat.

Nu utilizați produsul în spații cu umiditate ridicată sau ventilație insuficientă, deoarece componentele electrice se pot deteriora.

Nu utilizați echipamentul în exterior.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un tehnician autorizat.

Când sertarul UV este deschis, lumina ultravioletă se oprește automat pentru protecția utilizatorului.

5. Recomandări de utilizare

Manipulați cu atenție căruciorul pentru a evita deteriorarea structurii din lemn.

Evitați expunerea produsului la lumina directă a soarelui.

Nu depășiți greutatea maximă admisă.

6. Întreținere și curățare

Pentru menținerea produsului în stare optimă:

Curățați suprafața cu o lavetă umedă și puțin detergent.

Ștergeți imediat suprafața pentru a preveni deteriorarea lemnului.

Curățați sertarul cu lampă UV după fiecare utilizare folosind un produs dezinfectant.

7. Înlocuirea lămpii UV

Dacă lampa fluorescentă nu mai funcționează, urmați acești pași:

Scoateți sertarul din cărucior.

Pentru a-l scoate, apăsați clemele aflate pe ghidajele sertarului.

Există o clemă pe fiecare ghidaj – una se apasă în sus, cealaltă în jos.

După scoaterea sertarului, veți vedea suportul lămpii fluorescente.

Rotiți lampa aproximativ o jumătate de tură pentru a o scoate.

Introduceți lampa nouă și fixați-o prin rotire.

Introduceți sertarul la loc.

Produsul este acum gata de utilizare.

Referință piesă de schimb: 10071 (suport + lampă)

8. Specificații tehnice

Model: WKT001

Putere nominală: 6 W

Tensiune nominală: AC 220V

Frecvență: 50 Hz

Greutate netă / brută: 26 / 33 kg

Dimensiuni produs: 55 × 40 × 53,5 / 70 cm

Sarcină maximă: 50 kg

Material: placaj alb

9. Certificat de Conformitate CE

Acest produs respectă următoarele directive europene:

Directiva privind joasa tensiune – 2014/35/EU

Directiva privind compatibilitatea electromagnetică – 2014/30/EU

10. Reciclare

Simbolul de reciclare indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere.

Acesta trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind reciclarea echipamentelor electrice și electronice, pentru protejarea mediului.